

4 raisons de l'utiliser:

1. Prolongation de la durée de port de la poche^{1,2}
2. Facile d'utilisation¹
3. Clic audible : offre plus de sécurité et de confiance
4. Amélioration de la qualité de vie¹

Antécédents du patient:

- Femme de 57 ans
- Hospitalisée avec un choc septique et une microperforation iléale due à une coprostase
- Déc 2019 : Formation en urgence d'une iléostomie en boucle
- Jan 2021 : Résection laparoscopique de 2 sténoses coliques
- Stomie à haut débit de selles

Problèmes:

- Plusieurs fuites ont été constatées chaque jour et l'infirmière a d'abord pensé qu'elles se situaient sous le support ou le système de connexion. Après un examen approfondi, des effluents 'gras' s'infiltraient à travers le film plastique des poches.
- Essai infructueux de nombreux systèmes 2-pièces
- Changement du support et de la poche plusieurs fois par jour
- Peau fragile et sensible
- Lésions cutanées péristomiales régulières dues aux fuites des poches
- Anxiété et dépression dues aux fuites

Résultats obtenus avec eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- Changement pour eakin dot® 2-pièces convexe souple avec anneau eakin Cohesive® SLIMS
- Problèmes de fuites résolus
- Changement de support réduit à deux fois par semaine et changement de poche une fois par jour (maxi-poche utilisée la nuit)
- Qualité de vie grandement améliorée : réduction de l'anxiété, amélioration du sommeil, confiance retrouvée
- Sécurité et confort améliorés
- L'anneau pop-up est facile à utiliser et permet de fixer facilement la poche

“ C'est dommage que nous ayons lutté si longtemps. C'est un vrai soulagement d'avoir trouvé la bonne solution pour cette patiente. ”

Margriet Franse-Rentmeester


Étude de cas soumise par : Margriet Franse-Rentmeester, infirmière stomathérapeute, Hôpital Admiraal de Ruyter, Pays-Bas



Avant eakin dot®



Anneau eakin Cohesive® SLIMS

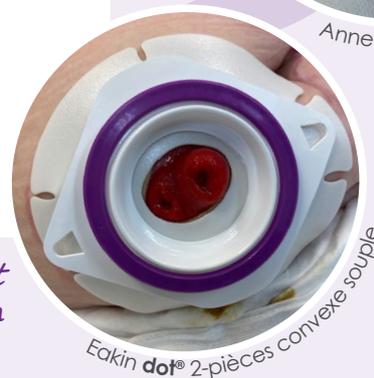

Eakin dot® 2-pièces convexe souple

Preuves cliniques en faveur d'eakin dot® 2-pièces convexe souple:

- Il a été cliniquement prouvé que l'hydrocolloïde *skinsmart™* offre une plus grande sécurité, une durée de port prolongée et une meilleure tolérance cutanée, par rapport aux autres poches leaders du marché et aux autres systèmes 2-pièces¹
- L'anneau de guidage violet est facile à utiliser et assure une fixation sûre de la poche