

# eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour gérer les désagréments à long terme liés à une stomie.

## 4 Raisons de l'utiliser :

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.<sup>1</sup>
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.<sup>2</sup>
3. Les désagréments sur le long terme peuvent avoir une influence majeure sur la capacité d'une personne à vivre normalement.<sup>3</sup>
4. Il faudra prendre en compte certaines considérations et restrictions lors du choix d'un produit approprié, afin d'encourager l'autonomie de la personne stomisée.<sup>3</sup>

\*Skinsmart: respectueux de la peau

eakin dot®

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE

## Historique du patient:

- Homme de 75 ans vivant seul et dont la mobilité est limitée
- A subi un cancer rectal
- Résection pour créer une colostomie
- Antécédents de maladies chroniques, incluant la maladie de Parkinson, des troubles bipolaires, de l'hypertension, de la sténose aortique et de l'arthrose



## L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Après que l'infirmière stomathérapeute ait déterminé les capacités du patient, elle a recommandé eakin dot® 2-pièces en post-opératoire
- Revu 3 semaines après l'opération

## Retours de l'infirmière:

- Aucune fuite avec l'appareillage eakin dot® 2-pièces
- Cela lui a grandement permis d'améliorer sa confiance en lui
- La peau péristomiale est saine
- Il est autonome et peut changer lui-même son appareillage
- Changement du support tous les 3-4 jours
- Il dit adorer sa poche et en particulier la facilité de couplage grâce au CLIC audible lors de la mise en place de la poche



## Résultats:

- Il est autonome, aucun problème ou fuite
- La stomie est belle, de 30 mm de diamètre
- La peau péristomiale est intacte
- Malgré des tremblements de plus en plus intenses dus à la maladie de Parkinson, il est capable de coupler facilement l'appareillage

## Preuves cliniques des bénéfices d'eakin dot® 2-pièces:

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™\* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

## Etude de cas remise par:

Kelly Vickers,  
infirmière stomathérapeute,  
Hôpital Lyell Mc Ewin,  
Adelaïde,  
Australie.

## Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Iley H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. *BJN* 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Reading L (2014) Practical guidance for nurses caring for patients with long-term conditions. *British Journal of Community Nursing*21(2) 90-98