

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour le traitement d'une hernie parastomiale

4 raisons de l'utiliser:

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port fiable et prévisible.²
3. Les hernies parastomiales sont une complication courante selon les stomathérapeutes.³ Elles apparaissent dans 25 à 50% des cas.⁴
4. La guérison post-opératoire n'est pas toujours simple. Certains patients nécessitent un changement de produits à cause de douleurs post-opératoires et la gestion des plaies.

Etude de cas remise par :

Felicity Rackham / Liz Meakin, infirmières stomathérapeutes, Epworth Eastern Hospital, Australie

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Burch J. 2018 Nursing strategies for the prevention and management of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a prevention programme 3(2):23-27

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient:

- Une hernie est apparue chez Mme A - femme de 73 ans - suite à une colostomie
- Après une opération chirurgicale, cette dame souhaitait reprendre son ancien appareillage 2-pièces convexe qu'elle trouvait confortable et dont elle avait l'habitude de se servir

Problèmes:

- Douleur récurrente sur le côté gauche de la stomie, indiquant que le placement du support convexe faisait pression autour de la stomie
- Des fuites dues à la surface non plane autour de la stomie



Analyse de l'infirmière:

- Peau abimée autour de la stomie
- Des bleus légers et une peau fragile sur le côté droit du support.
- Des signes de lésions dûs au retrait de l'adhésif au niveau des extrémités du support à cause des fréquents changements

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Moins de douleur et de bleus sur le côté latéral de l'appareil
- Mme A se sent à l'aise pour s'occuper seule de son appareillage chez elle

Résultats:

- 2 semaines après avoir commencé à utiliser eakin dot® 2-pièces en plus d'un anneau protecteur sous le support, l'état de la peau de Mme A s'était considérablement amélioré
- La peau a continué sa guérison lors des semaines suivantes

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces:

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE