

# eakin dot®

Appareillage 2-pièces  
support plan  
anneau de 80 mm

Choisissez  
eakin dot®  
2-pièces pour  
une personne  
ayant une peau  
sensible

### 3 raisons de l'utiliser :

1. Sécurité, confiance et confort accrus pour les patients<sup>1,2</sup>
2. L'hydrocolloïde *skinsmart*®\* est respectueux de la peau pour une durée de port allongée<sup>1,2</sup>
3. Amélioration significative de l'état de la peau péristomiale<sup>1,2</sup>

#### Étude de cas soumise par :

Marieke Muller, infirmière  
stomathérapeute,  
Hôpital de Tergooi, Hilversum,  
Pays-Bas

1. eakin dot® 2-piece user evaluations. Data on file. 2017-2019  
2. eakin dot® 2-piece nurse case study. Data on file. 2019

\*skinsmart® : respectueux de la peau

eakin dot®

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE

### Antécédents du patient :

- **13 mars 2019** : Résection du recto-sigmoïde aiguë avec colostomie terminale due à une perforation sigmoïde (tumeur)
- Très grande stomie post-opératoire
- Patient transféré en maison de retraite avec un système 2-pièces adhésif avec poche fermée

### Problèmes/ Examen par l'infirmière :

- **29 mars 2019** : 1ère visite de suivi à l'hôpital - **peau hypersensible et sévèrement excoriée**. Preuve de **décollement de la peau et présence d'ampoules** nécessitant un retrait d'adhésif pour retirer le support
- La taille de la stomie diminue - passage à un système 2-pièces plus discret
- Ampoules traitées avec de la poudre. Des renforts de type demi-lune utilisés sur les extrémités du support
- On lui conseille de changer le support 3 x par semaine et la poche fermée 1 x par jour. Nouvelle évaluation dans une semaine
- **2 avril 2019** : **Peau douloureuse et irritée** avec des ampoules. **Fuites** sous le support sur les côtés gauche et droit. Support porté pendant 4 jours. Poche changée une fois par jour



### L'infirmière lui recommande eakin dot® 2-pièces :

- **2 avril 2019** : 2e visite de suivi à l'hôpital - on lui conseille de **commencer à utiliser eakin dot®** avec un anneau eakin Cohesive StomaWrap™ et un renfort demi-lune sur le côté droit.
- Utilisation d'une poche vidable en raison de selles liquides. Retour en maison de retraite avec la recommandation de **changer le support 2 x par semaine** et continuer à changer de poche tous les jours
- **5 avr 2019** : 1er changement de support à la maison de retraite avec un changement de poche quotidien, poche vidangée durant la journée



### Résultat :

- **8 avril 2019** : **amélioration significative de la peau péristomiale**
- **9 avril 2019** : 3e visite de suivi à l'hôpital.
- Capable de **changer lui-même son support** à l'aide d'un spray de retrait et fait part d'une **diminution de la douleur**
- **12 avr 2019** : changement de support à la maison de retraite
- **15 avr 2019** : retour à l'utilisation d'une poche fermée, en la changeant 1 à 2 fois/jour. Pas de fuites, les selles sont plus épaisses et la peau a cicatrisé dans les 2 semaines suivant le passage à l'appareillage eakin dot® 2-pièces support plan



### Preuves cliniques de l'appareillage eakin dot® 2-pièces support plan :

- Il est cliniquement prouvé que l'hydrocolloïde *skinsmart*®\* pour une tenue longue durée offre plus de sécurité, une durée de port prolongée du support et une meilleure tolérance cutanée par rapport aux autres hydrocolloïdes de systèmes 2-pièces testés.<sup>1</sup>