

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour une personne active ayant une peau à problèmes peristomiale

4 raisons de l'utiliser :

1. Le choix d'un appareillage idéal est une étape importante de la guérison postopératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.²
3. L'irritation péristomiale est une complication courante lors de la prise en charge d'une stomie.
4. Les problèmes de peau péristomiale peuvent être éliminés avec un appareillage adapté.^{3,4}

Etude de cas remise par :

Karine Maréchal, ET nurse FSK, France

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Iley H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient :

- Mme N, 30ans, souffre de la maladie de Crohns depuis 10 ans
- Un ileostomie a été effectué en 2016, suite à un abcès sur le colon

Problèmes :

- Sortie de l'hôpital avec un appareillage 2-pièces. Autour de sa stomie, il y a des rougeurs, pas de démangeaisons. Le stomathérapeute annonce qu'il est normal d'avoir une réaction sur la peau.
- Pas de suivi avec un stomathérapeute en place.
- Chez elle, elle constate que les démangeaisons et les rougeurs s'empirent. Elle pense que c'est normal et elle essaie de gérer seule avec des conseils de son chirurgien et son pharmacien.
- Lors d'un RDV avec le chirurgien il recommande de voir le problème avec un stomathérapeute.



Analyse de l'infirmière (1 an après l'opération) :

- Mme N. utilise de nombreux accessoires et change son support deux fois par jour.
- Elle est très active, fait du sport 5h par semaine, en plus de son travail.
- L'infirmière lui suggère une routine de soin plus simple.

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces :

- Grâce à son hydrocolloïde *skinsmart*™* qui permet une plus longue durée de port
- La pâte eakin Cohesive®, une ceinture et de la poudre ont aussi été recommandés.

Résultats :

- Mme N est ravie, elle change désormais son support tous les trois jours. Elle a enfin trouvé un appareillage confortable.
- Mme N choisi de retirer le support au bout de trois jours, mais elle estime que celui-ci pourrait tenir plus longtemps
- Elle est plus détendue lors de ces exercices physiques et au travail.

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces :

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour vos problèmes de peau péristomiale

4 raisons de l'utiliser :

1. Le choix d'un appareillage idéal est une étape importante de la guérison postopératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.²
3. L'irritation péristomiale est une complication courante lors de la prise en charge d'une stomie.
4. Les problèmes de peau péristomiale peuvent être éliminés avec un appareillage adapté.^{3,4}

Etude de cas remise par :

Mirjam van Berkom

Functie: Casemanager colncaare en stomaverpleegkundige, Netherlands


Références :

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient :

- 2011 : Mr V.d.B. a subi le retrait d'un adénome villositaire par endoscopie.
- 2012 : retrait des tissus cicatriciels par colonoscopie.
- Septembre 2017 : Diagnostic d'un cancer colorectal .
- Oct 2017 Iléostomie en chien de fusil
- L'apprentissage des soins et utilisation d'une poche une pièce plate et vidangeable.

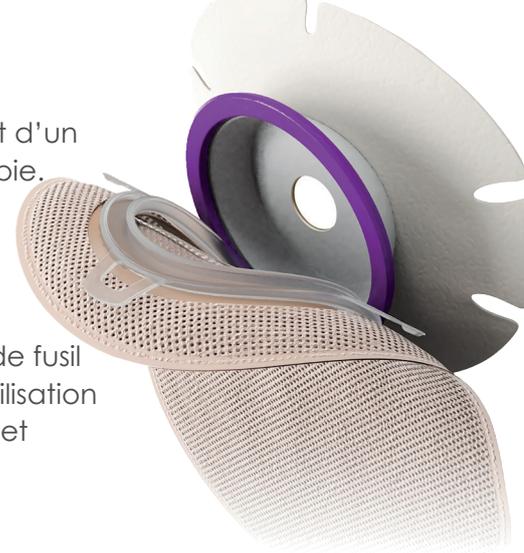

Analyse de l'infirmière :

- Stomie saine
- Peau péristomiale intacte
- Se sert d'un 1-pièce modulable à cause d'une stomie de forme ovale et avec un œdème.
- Autonome dans le soin de sa stomie
- Rentre chez elle avec le suivi



Problèmes :

- 2 semaines après l'opération, la patiente souffre de fuites et sa peau est rouge et abîmée.



L'infirmière recommande eakin dot® 2-pièces (et de la poudre) :

- Grâce à son hydrocolloïde *skinsmart*™* qui permet une plus longue durée de port
- La forme et la taille du support protègent la peau péristomiale



Résultats :

- 5 jours plus tard, la peau péristomiale a guéri et l'utilisation de la poudre est arrêtée.
- Le support reste en place 2-3 jours et le changement de poche s'effectue aussi tous les 2-3 jours.

“Je ressens un sentiment de sécurité lors de la mise en place de la poche grâce au cliqué audible et de flexibilité lorsque je suis en mouvement”

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces :

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE