

Étude de cas soumise par : Amélie Carpentier, Infirmière stomathérapeute, CHRU, Lille, France

### 3 raisons pratiques :

1. Protecteur cutané *skinsmart*™\* respectueux de la peau pour une tenue longue durée<sup>1</sup>
2. Nette amélioration de la peau péristomiale<sup>1,2</sup>
3. Sécurité renforcée<sup>1,2</sup>, confort<sup>1,2</sup> et bien-être émotionnel<sup>2</sup>



## HISTOIRE DE CAMILLE

### Antécédents médicaux :

- Jeune fille de 12 ans
- **Fév. 2018** : Colectomie subtotale avec anastomose iléo-anale protégée par iléostomie pour colite aiguë grave

### Problèmes :

- Des rougeurs, des démangeaisons et des irritations apparaissent
- Peau très excoriée dans un premier temps
- **Nov. 2018** : Devant la persistance d'une rectite inflammatoire, et ce malgré un traitement médical par Humira, une proctectomie a été réalisée

### Examen de l'infirmière :

- **Sept. 2018** : Dermite irritative sévère confirmée. Application d'un spray protecteur et de dermoval 1 fois par semaine
- **Sept./mi-oct. 2018** : Échec des essais avec divers appareillages 2-pièces en raison de réactions concomitantes dues à la prise d'Humira, un RCH mal équilibré qui ont interagis avec les hydrocolloïdes des supports utilisés d'une manière persistante
- **Mi-oct. 2018** : Essai de l'appareillage eakin dot® 2-pièces support plan\* avec un anneau convexe et une ceinture. Amélioration significative de la peau après 8 jours

\* Appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple non disponible à cette époque

### Succès avec l'appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- **Déc. 2018** : Passage à l'appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple et d'une ceinture
- **Mai 2018** : La peau est guérie. Plus besoin d'utiliser d'anneau protecteur, de spray protecteur ou de Dermoal



### Preuves cliniques pour choisir l'appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- Il est cliniquement prouvé que le protecteur cutané *skinsmart*™\* procure une adhérence plus efficace et offre une sécurité renforcée, prolonge la durée d'utilisation de la poche et est plus respectueux de la peau, comparé aux autres appareillages leaders du marché<sup>1</sup>
- Le support eakin dot® a répondu pleinement aux problèmes de peau péristomiale chez cette jeune fille avec une peau fragilisée par la maladie et par les traitements concomitants.

\*skinsmart™ : respectueux de la peau