

*“Excellente protection
cutanée,
application sans douleur,
pas de résidus”*

Infirmière stomathérapeute
Région Ile-de-France,
À propos de la pâte
eakin Cohesive®



La pâte eakin **Cohesive**® est un dispositif médical
de classe I pris en charge par l'assurance maladie



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Pâte eakin Cohesive®

RECOMMANDÉE PAR 97% DES INFIRMIÈRES
STOMATHÉRAPEUTES¹

Chez **eakin®**, nous mettons tout en oeuvre pour que nos clients profitent d'une vie aussi facile, heureuse et intense que possible. Nous voulons que leur stomie reste **un petit détail dans une plus grande vie**.

Vos remarques précieuses nous aident à accomplir cette promesse et nous permettent d'innover et de nous améliorer. Voici un bref aperçu de ce que vos collègues nous ont fait part...

Voici 3 bonnes raisons d'utiliser la pâte eakin Cohesive®


1. Sa formule **sans alcool** est **respectueuse de la peau**, elle ne pique pas, ce qui la rend idéale pour **les peaux abîmées, sensibles ou délicates**.

“ *Aucun douleur ni picotement au moment de l'application* ”
Infirmière stomathérapeute, région Île-de-France


2. **Nivelle la peau** et permet de **prévenir les fuites** en formant une barrière efficace autour d'une stomie, une fistule ou une plaie.

3. **Comble les plis, les creux et les cicatrices** afin d'augmenter la durée de port de l'appareillage.

“ *Une durée de port plus longue pour un appareillage complexe* ”
Infirmière stomathérapeute, région Île-de-France

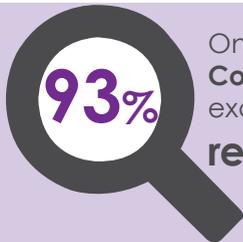

Ont évalué la pâte eakin Cohesive® bonne ou excellente en terme de **respect de la peau**¹

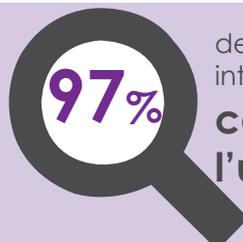

des infirmières interrogées vont **continuer à l'utiliser**¹

“ *Excellent produit facile d'utilisation* ”
Infirmière stomathérapeute, Région Hauts-de-France

1. L'évaluation de la pâte eakin Cohesive® a été réalisée auprès de 60 infirmières stomathérapeutes françaises en 2018.

Pâte eakin **Cohesive**® utilisée pour une protection sans douleur

Historique du patient :

- Femme de 43 ans habitant au Koweït
- Janvier 2018: iléostomie formée suite à une laparotomie pour péritonite
- Avril 2018: Hospitalisation à Poissy avec une dénutrition sévère et une fistule entéro-cutanée de la ligne blanche péri-ombilicale et déhiscence pariétale



Problèmes :

- Plaie dans un creux avec une fistule située dans la plaie
- Fuites de liquide digestif et corrosif causant des douleurs et de l'inconfort
- Changements nécessaires plusieurs fois par jour
- Charge de travail importante pour le personnel hospitalier et barrière de la langue

Nouveau plan de prise en charge :

- Objectifs des soins: Recueillir les effluents, cicatriser la déhiscence, stopper les fuites et diminuer les douleurs
- Application de la mousse de Thérapie par Pression Négative et son film adhésif
- Joint d'étanchéité sans douleur avec la pâte eakin **Cohesive**® sans alcool autour de la fistule
- Application d'un anneau convexe, de la ventouse de la TPN et mise en aspiration
- Support convexe, poche vidangeable et ceinture pour maintenir l'appareillage
- Soins faits 3 fois par semaine



Bénéfices de la pâte eakin **Cohesive**® :

- Pâte respectueuse de la peau qui protège et prévient des fuites
- Indolore à la pose et facilité du retrait (ne laisse pas de résidus)

Conclusion :

- Une cicatrisation optimale et un système d'appareillage étanche ont été obtenus. Après la résection de la fistule, la personne a pu rentrer au Koweït fin Juin 2018



INFORMATIONS

La pâte eakin **Cohesive**[®]

Référence produit:	839010
Conditionnement:	1 tube, 60g
Échantillons	20g disponible
Code LPPR	6177030*
Code ACL13	5060267419415

* Nouveau code LPPR individuel. Dispositif médical de classe I, pris en charge en ville uniquement et selon les conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale

Échantillons disponibles



eakin[®] 

T: 01.70.77.04.29

E: contact@eakin.fr

W: www.eakin.fr