

Antécédents

- Bébé né à 39 semaines avec un anus imperforé nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence.
- Le bébé a subi une colostomie à double abouchement.
- Stomie proximale latérale. Stomie en trompe et de forme circulaire.
- Stomie distale - médiane. Stomie plane et étroite.



Solution avec eakin freeseal[®] air

Peau: Aucune fuite n'a été constatée et la peau péristomiale est restée saine. Une routine sûre et stable a été mise en place.

Gestion de la stomie: La famille est formée à l'application d'eakin **freeseal**[®] sur la poche avant de le poser sur la peau. Ils se sentent à l'aise dans cette routine stable.



Conseils de l'infirmière

Une poche pédiatrique plate **eakin**[®] a été appliquée sur le bébé, avec eakin **freeseal**[®] dès le début en raison de sa stomie plane.

En raison de la forme irrégulière de la stomie à double abouchement, les parents du bébé ont appris à appliquer l'anneau à l'arrière de la poche avant de la mettre en place. Cela permet de placer l'anneau avec précision et sans erreur autour des stomies, qui étaient difficiles à gérer. Cela permet également de réduire le temps nécessaire à l'application de l'anneau.

eakin **freeseal**[®] a été choisi pour 3 raisons:

1. Il s'agit d'un anneau fin, idéal pour assurer la sécurité de la poche et adapté au patient.
2. Bonne capacité d'absorption pour éviter les fuites
3. Il est possible de le mouler, en particulier pour s'adapter à la forme de cette stomie.

Il s'agit d'une étude de cas individuelle et, par conséquent, les affirmations faites correspondent à l'expérience de l'infirmière et n'ont pas été validées par eakin[®]