

Anneaux eakin Cohesive® stomawrap pour les stomies de grande taille et mal situées.

eakin® 

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Antécédents

- Dame de 73 ans qui était très active et aimait marcher.
- 2011 : AVC entraînant une incontinence fécale et urinaire.
- 2018 : Formation d'une iléostomie en boucle.

Problèmes rencontrés

- Stomie compliquée - à droite, granulome sur la muqueuse et à gauche inclinée et saillante.
- Stomie difficile à voir du fait de son emplacement.
- Lésions de la peau péristomiale dues à des fuites constantes.
- Insomnie due à des douleurs abdominales permanentes, y compris au niveau de la stomie.
- Changements fréquents de support – 5 fois par semaine.
- Son système deux pièces était rigide, trop visible et inconfortable.

Conseils de l'infirmière

Elle a d'abord changé de système deux pièces, puis est passé à un système une pièce, mais cela s'est avéré infructueux. Les fuites continuaient et la peau péristomiale restait rouge et douloureuse.

Une solution a été trouvée avec un appareillage 2 pièces eakin dot® et un anneau eakin Cohesive® stomawrap. L'anneau a été choisi pour sa découpe unique et sa forme ovale permettant une application facile - enveloppant la stomie pour créer un joint sécurisant.

Solution avec eakin Cohesive® stomawrap

Nouvelle routine régulière

- L'anneau prévient les fuites, réduisant les changements d'appareillage de 5, à 2 hebdomadaires.
- Les changements sont plus rapides, ne prenant que 15 minutes.
- L'indépendance a été restaurée et la dame peut changer elle-même sa poche en toute confiance.

Peau: L'état de la peau péristomiale s'est considérablement amélioré, il n'y a plus de fuites.

Gestion de la stomie: Avec quelques ajustements au niveau de la découpe du support et l'introduction de l'anneau, une bonne routine a été établie.

Une vie plus riche: La sérénité a été rétablie - après une longue lutte, la tranquillité d'esprit est revenue et cette dame est satisfaite de ses soins de stomie.

Avant



Amélioration
de la peau



eakin® 

01.70.77.04.29
contact@eakin.fr
www.eakin.fr

Étude de cas soumise par:
Marjon Valk, infirmière spécialisée dans les stomies et la continence
Hôpital Bernhoven, Uden, Pays-Bas