

## eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large

pour la prise en charge des ulcérations péristomiales importantes chez une patiente sous immunothérapie

Étude de cas soumise par:

Axelle Pierre-Joseph, Infirmière Stomathérapeute , Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris

### Antécédents

- Patiente porteuse d'un Bricker depuis 2020.
- Initialement indépendante pour les soins à sa stomie.
- Sous traitement d'immunothérapie, 1 séance toutes les 3 semaines depuis octobre 2021.

### Problèmes rencontrés

- Initialement prise en charge par le service d'urologie où une pâte à base d'alcool a été prescrite pour prévenir l'apparition de fuites.
- Mai 2022 : Des ulcérations péristomiales importantes et des lésions cutanées douloureuses ont nécessité l'intervention d'une Infirmière Stomathérapeute.
- Fuites récurrentes au niveau de l'appareillage, peau très douloureuse et sensations de brûlures lors des changements de poche.
- Cette dame n'est plus en mesure de gérer sa stomie de façon autonome.

### Conseils de l'infirmière

Un nouveau protocole de soins a été mis en place fin Mai 2022:

- Utiliser un spray de retrait d'adhésif pour éviter d'abîmer davantage une peau fragilisée.
- Nettoyer la peau péristomiale à l'eau et du Cicaplast B5 LAVANT, afin de limiter la dermatite irritative et de déterger la fibrine présente sur les ulcérations.
- Sécher en tamponnant doucement la zone péristomiale.
- Appliquer une mèche – EXUFIBER sur les 3 ulcérations péristomiales.
- Cesser l'utilisation de la pâte alcoolisée et commencer à utiliser la pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup>, sans alcool. Un anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large, choisi pour sa taille de 98 mm a permis de couvrir la peau péristomiale endommagée.
- Appliquer la poche et ajouter une ceinture de maintien pour bien fixer l'appareillage.



12 mai 2022



23 mai 2022



14 juin 2022



## Résultats obtenus avec eakin Cohesive<sup>®</sup> large

Les deux semaines suivantes ont montré une amélioration significative pour la patiente. Du fait de la guérison de l'ulcération, le soin avec les mèches ne s'avérant plus nécessaire. La pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup> et l'anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large ont créé une routine efficace de soins à la stomie.

**Peau:** L'ulcération a guéri et la peau péristomiale s'est considérablement améliorée.

**Gestion de la stomie:** La dame trouve les produits faciles à utiliser et souhaite continuer d'utiliser la pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup> sans alcool.

**Une vie plus riche:** Cette dame était ravie de ne plus ressentir de douleur et de retrouver son indépendance dans sa routine de soins de stomie. L'infirmière stomathérapeute a déclaré

*“L'efficacité cicatrisante de toute la gamme d'accessoires eakin<sup>®</sup> et en particulier de l'anneau de 98 mm et de la pâte a été prouvée pour cette patiente.”*

## Produits utilisés

eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large  
anneau 839001FR



Pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup>  
839010

