

**Étude de cas soumise par :** Laura Han, infirmière stomathérapeute, Haaglanden Medisch Centrum, Leidschendam, Pays-Bas

### 4 raisons de l'utiliser:

1. L'hydrocolloïde respectueux de la peau prolonge la durée de port et contribue à améliorer l'état de la peau péristomiale.
2. L'anneau de guidage pop-up violet réduit la pression sur l'abdomen lors du changement de poche.
3. Les plis d'aisance du support permettent une bonne adaptation à la hernie.
4. Facile à utiliser.

### Histoire du patient:

- Femme de 68 ans.
- Octobre 2006 : Résection antérieure basse due à un carcinome rectal. Formation d'une colostomie terminale après une fistule anastomotique.
- Stomie au ras de la peau et hernie parastomale. Porte une ceinture de soutien.

### Problèmes:

- Fuite de la poche 1-pièce plate causant des lésions cutanées péristomiales.
- 2017: Hypergranulation traitée avec du nitrate d'argent - amélioration mineure.
- Passage à une poche 1-pièce convexe. Des ulcères se sont formés et se sont détériorés.
- **Multiples traitements topiques utilisés pendant 2 ans.** Aucune amélioration de l'état de la peau.
- Février 2019 : Orientée vers la dermatologie (aucune cause médicale trouvée par la biopsie et les tests d'allergie).
- Poursuite des traitements topiques avec des corticostéroïdes. Pas d'amélioration.
- Décembre 2019 : Pense que la technique de la patiente avec sa poche 1-pièce pouvait aggraver le problème. Elle a été renvoyée vers l'infirmière stomathérapeute.
- Changement de la poche 1-pièce 3 fois par jour.

### Résultats obtenus avec eakin dot® 2-pièces:

- Déc 2019 : L'infirmière stomathérapeute recommande l'utilisation d'eakin dot® 2-pièces plat (pour réduire la pression sur l'ulcération) et de l'anneau eakin Cohesive SLIMS®.
- Réduction significative des changements quotidiens de support à 3x fois par semaine.
- Janvier 2020 : Guérison des ulcères.
- JJuillet 2020 : Légère détérioration de la peau péristomiale due à un creusement avec le support plat - Changement pour un support eakin dot® 2-pièces convexe souple.
- Août 2020 : Fuites et ulcères stoppés. Réduction du nombre de changements de support à 2 fois par semaine.



Avant eakin dot®



Après eakin dot® 2-pièces plat



eakin dot® 2-pièces convexe souple

### Preuves cliniques en faveur d'eakin dot® 2-pièces convexe souple:

- L'hydrocolloïde *skinsmart™* est cliniquement prouvé comme offrant une plus grande sécurité, une plus longue durée de port de la poche et une meilleure tolérance cutanée par rapport aux autres poches leaders du marché<sup>1</sup>.