

Etude de cas soumise par : Valérie Grodet, Infirmière Stomathérapeute

### 4 raisons d'utiliser :

1. Temps de port prolongé<sup>1</sup>
2. Améliore le confort<sup>1,2</sup>
3. Prévient les fuites<sup>1</sup>
4. Impact positif pour l'équipe soignante et la famille du patient



### Antécédents du patient :

- Mme B., femme âgée de 77 ans, vit avec son petit fils
- Ne se déplace plus et est dépendante pour le quotidien
- Prise en charge par l'HAD pour l'alimentation entérale, des pansements complexes d'escarres (sacrum, trochanter et talons), les soins de stomie et les soins d'hygiène
- Mme B. souffre d'obésité et est également diabétique insulino-dépendante et dénutrie
- Mme B. présente des escarres importants ainsi qu'un abcès au niveau du rectum.
- Afin d'optimiser la cicatrisation, une sonde urinaire est posée et une colostomie est réalisée

### Problèmes :

- Colostomie gauche provisoire, invaginée présentant deux creux
- Abdomen très mou et cicatriciel
- Transit régulier mais abondant.
- L'appareillage 2-pièces actuel n'est plus adapté car le support est trop rigide et inconfortable. Le support se décolle à cause des selles et doit être changé tous les jours.

### Objectifs atteints avec eakin dot® 2-pièces :

- eakin dot® 2-pièces convexe souple a été choisi pour la souplesse et le confort de son support (anneau de 80mm), qui se clipse sans exercer de pression sur l'abdomen douloureux.
- La bonne adhésion à la peau et le soufflet ont permis d'éduquer facilement son petit fils aux changement de poche si besoin la nuit.
- La convexité permet de bien atteindre la stomie.
- Lors du suivi 3 semaines après, Mme B. est satisfaite de son nouveau système confortable et fiable.
- Les soignants apprécient le retrait aisé et le clipsage facile de la poche.
- Le temps de port du système est désormais prolongé à 48h avec eakin dot® 2-pièces.



Avant eakin dot®



Utilisation d'eakin dot® 2-pièces



Utilisation de la pâte eakin Cohésive® et de l'anneau eakin dot®

### Arguments cliniques pour le choix d'eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- Durée de port prolongée grâce à l'hydrocolloïde *skinsmart™* (cliniquement prouvé), offre une plus grande sérénité et une durée de port plus longue que les autres appareillages leaders du marché.<sup>2</sup>
- Le support convexe souple offre une meilleure étanchéité autour de la stomie par rapport aux autres systèmes 2-pièces.<sup>2</sup>
- 100% des utilisateurs reconnaissent qu'il épouse bien les contours du corps.<sup>2</sup>