

pour protéger la peau délicate des enfants et lutter contre les lésions cutanées péristomiales

*Étude de cas soumise par Claire Murphy,
infirmière stomathérapeute libérale,
Royaume-Uni.*

Antécédents

- Fillette de 2 ans.
- Naissance prématurée à 27+4 semaines de gestation.
- Entérocolite nécrosante - résection intestinale et syndrome de l'intestin court consécutif à la formation d'une iléostomie.
- Antécédents médicaux complexes comprenant une greffe de foie, une maladie pulmonaire chronique et des infections urinaires récurrentes à Klebsiella.

Problems Experienced


- Lésions de la peau péristomiale en raison de fuites et d'une sensibilité de la peau. Il en résulte un inconfort considérable pour la petite fille et une inquiétude pour ses parents.
- Les anneaux pour stomie précédents avaient provoqué une irritation de la peau et étaient difficiles à retirer de la peau, ce qui aggravait la douleur.
- Plusieurs poches avaient été essayées sans succès.
- Les antibiotiques utilisés pour les infections urinaires avaient affaibli le système immunitaire et contribué aux épisodes d'irritation de la peau.
- Routine quotidienne d'au moins 6 changements de poche. Lorsque la peau était trop irritée et moite pour appliquer une autre poche, une compresse et de la pâte Ilex étaient utilisées.

Conseils de l'infirmière

Jour 1: Une poche convexe souple était déjà utilisée, c'est pourquoi eakin **freeseal**[®], nouveau sur le marché, a été testé. eakin **freeseal**[®] a été choisi en raison de sa finesse (1,8 mm d'épaisseur seulement), qui a été jugée parfaite pour la convexité.

En outre, eakin **freeseal**[®] a été choisi parce qu'il est absorbant, ce qui le rend efficace pour empêcher les fuites et protéger la peau contre les lésions. L'anneau est également facile à retirer et peut se décoller en une seule pièce, ce qui évite d'endommager la peau lors du retrait et simplifie le changement de poche.

Jour 1

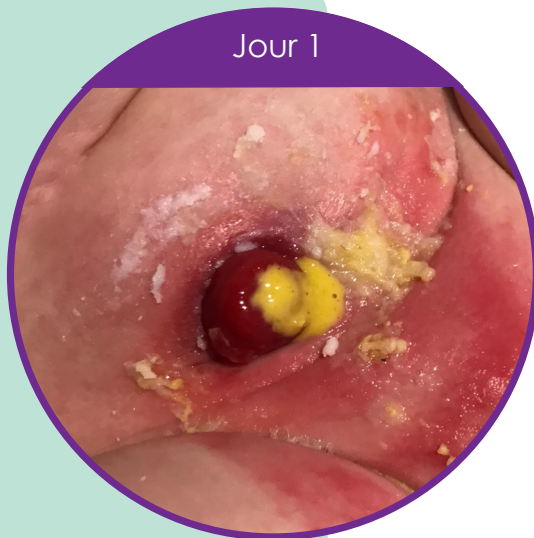

“ Ce petit anneau a fait une telle différence ”

La mère de l'enfant a commenté:
*“Ce petit anneau a fait une telle différence !
 La peau de ma fille est en bien meilleur état et
 la poche peut dorénavant être portée pen-
 dant 24 heures. L'anneau reste bien en place
 et Lucy peut à nouveau jouer sans se soucier
 des fuites.”*

Solution avec eakin freeseal[®]

Jour 5




Jour 5: Lors de la deuxième visite de l'infirmière, la peau de la petite fille s'était améliorée et ses parents étaient en mesure d'atteindre environ 8 heures de port. Il n'y avait pas eu d'autres fuites.

Jour 9



Jour 9: La peau s'était encore améliorée, avec un changement évident de la circonférence de la stomie.

Jour 12

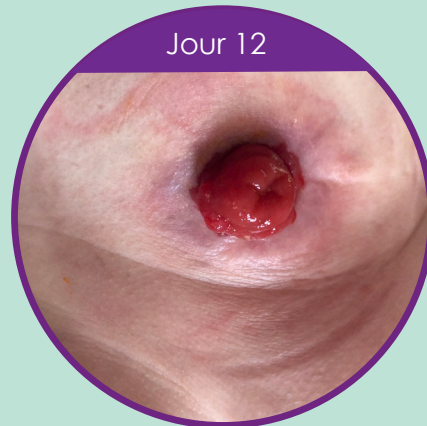

Jour 12: La peau avait complètement guéri et la durée de port était passée à 24 heures. L'utilisation du système convexe souple et de l'anneau eakin **freeseal**[®] s'est ensuite poursuivie sans aucune autre fuite.

Il s'agit d'une étude de cas individuelle et, par conséquent, les affirmations faites correspondent à l'expérience de l'infirmière et n'ont pas été validées par eakin[®]