

Antécédents

- Femme de 64 ans.
- Juin 22 - opérée pour une masse tumorale du côlon transverse
- Demi colectomie droite élargie, résection partielle de la grande courbure gastrique et formation d'une stomie double (iléo-colostomie)

Problèmes Rencontrés

- Stomie affleurante et proche de la plaie d'incision et de la zone ombilicale.
- Dermatite d'irritation provoquée par l'appareillage initial.

Conseils de l'infirmière

Juillet 2022 - Suggestion d'utiliser eakin **dot**® 2-pièces convexe souple 80mm et l'anneau eakin **freeseal**® pour créer un joint d'étanchéité sûr autour de la stomie.

Les produits **eakin**® ont été choisis pour leurs propriétés respectueuses de la peau.

Solution avec eakin freeseal®

Peau: L'état de la peau péristomiale s'est nettement amélioré et la peau a complètement cicatrisée au début du mois d'août 2022.

Avant



4 juillet 2022



7 juillet 2022



8 août 2022



Il s'agit d'une étude de cas individuelle et, par conséquent, les affirmations faites correspondent à l'expérience de l'infirmière et n'ont pas été validées par **eakin**®